

FLUORESCEÍNA

TIRAS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADAS PARA VISUALIZAR LOS DEFECTOS O ANOMALÍAS EN EL EPITELIO CORNEAL

TAMBIÉN ES ÚTIL PARA EVALUAR LA ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO DUROS Y LA TONOMETRÍA DE APLANACIÓN.



- ALTA CALIDAD .
- TIRAS DE FLUORESCEÍNA.
- 1MG DE FLUORESCEÍNA SÓDICA.
- CAJA CON 300 TIRAS.



PRESENTACIÓN

TIRAS DE FLUORESCEÍNA, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN FORMA ESTÉRIL. SON UTILIZADAS PARA MOSTRAR LOS DEFECTOS O ABRASIONES DEL EPITELIO CORNEAL, ASÍ COMO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS LENTES DE CONTACTO. CADA TIRA ESTÉRIL ESTÁ IMPREGNADA CON 1MG DE FLUORESCEÍNA DE SODIO.

INSTRUCCIONES DE USO:

PARA ASEGURAR LA FLUORESCENCIA TOTAL Y EL CONFORT DEL PACIENTE, LA PUNTA IMPREGNADA DE VISTAGLO® DEBE HUMEDECERSE LIGERAMENTE ANTES DE LA APLICACIÓN. PARA ESTE FIN SE DEBEN UTILIZAR UNA O DOS GOTAS DE SOLUCIÓN ESTÉRIL DE IRRIGACIÓN O SOLUCIÓN SALINA. TOQUE LA CONJUNTIVA O FÓRNIX SEGÚN SEA NECESARIO CON LA PUNTA HUMEDECIDA. SE RECOMIENDA QUE EL PACIENTE PARPADEE VARIAS VECES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.



ISEM

Ingeniería en Sistemas y Equipos Médicos

Horizonte 1156 Col. Jardines del Bosque, CP:44520,Guadalajara,Jalisco

Correo: marketing@isem.mx

www.isem.mx

Tel: (33) 3122 9881

(33) 31229771

